



Checklist

Diabetesverpleegkundige
Conventioneel (1/2)



YpsoPump®

Ter info: uw patiënt heeft ook een checklist ontvangen met door hem/haar uit te voeren acties.

Voorwaarden voor gebruik van het systeem:

- 1 Het type smartphone én het besturingssysteem zijn compatible met de mylife App. Controleer dit op mylife-diabetes.info of met de QR-code.



- 2 Patiënt gaat gebruik maken van kant en klare Pumpcards NovoRapid of Pumpcards Fiasp

Vorbereidingen voor de instructie:

- 3 In het Aanvraagportaal van de Medische Specialzaak:

a Bestel de mylife YpsoPump

b Bestel de mylife Orbit Micro (staal) of YpsoPump Inset (soft) infuussets

c Selecteer dat het systeem Conventioneel gebruikt wordt

d Selecteer soort instructie

o Online (E-learning)

o Thuis (E-learning met begeleiding)

o Polikliniek (E-learning met ziekenhuisinstructie)

e Vraag aan en motiveer indien Patiënt een 3 maanden ervaringsperiode nodig heeft

• I.g.v. Bosman in hun aanvraagportaal door deze optie te selecteren

• I.g.v. Mediq via www.mylife-diabetes.info, (wachtwoord Ypsomed!)



Checklist

Diabetesverpleegkundige
Conventioneel (2/2)



YpsoPump®

-
- 4 Verstrek Patiënt het volgende:
- a Een (recept voor een) 2-tal kunststof ampullen zoutoplossing 10 ml
 - b Een spuit met luerlock aansluiting met bijpassende naald
 - c Een recept Pumpcartes NovoRapid, Pumpcartes Fiasp
-
- 5 **E-learning instructie of E-learning met Begeleiding instructie:**
“De patient heeft mij gebeld voor het plannen van de start met insuline”
- E-learning met Ziekenhuisinstructie:**
“De Ypsomed instructeur heeft i.o.m. mij en patiënt een datum voor de start op insuline gepland”
-
- 6 Patiënt heeft het certificaat van E-learning mylife YpsoPump
-
- 7 Tijdens de therapiestart met insuline zijn de basaalstanden in de pomp en boluscalculator settings in de mylife App ingevoerd en gecontroleerd en heb ik deze gegevens meegegeven via het Formulier Therapiegegevens