



Checklist

Diabetesverpleegkundige
Hybrid Closed Loop (1/2)



YpsoPump®

Ter info: uw patiënt heeft ook een Checklijst ontvangen met door hem/haar uit te voeren acties.

Voorwaarden voor gebruik van het systeem:

- 1 Het type smartphone én het besturingssysteem zijn compatible met de CGM sensor.
Check via mylife-diabetes.info of via de QR-code

Patiënt heeft
een Dexcom
G6 sensor



Patiënt heeft
een Freestyle
Libre 3 sensor



- 2 Patiënt gaat gebruik maken van kant en klare Pumpcarters NovoRapid of Pumpcarters Fiasp

Vorbereidingen voor de instructie:

- 3 In het Aanvraagportaal van de Medische Specialzaak:
 - a Bestel de mylife YpsoPump
 - b Bestel de Dexcom G6 of FSL3 sensoren (indien nodig)
 - c Bestel de mylife Orbit Micro (staal) of YpsoPump Inset (soft) infuussets
 - d Selecteer dat het systeem als Hybrid Closed Loop gebruikt wordt
 - e Selecteer soort instructie
 - o Online (E-learning)
 - o Thuis (E-learning met begeleiding)
 - o Polikliniek (E-learning met ziekenhuisinstructie)
 - f Vraag aan en motiveer indien Patiënt een 3 maanden ervaringsperiode nodig heeft
 - I.g.v. Bosman in hun aanvraagportaal door deze optie te selecteren
 - I.g.v. Mediq via www.mylife-diabetes.info, (wachtwoord Ypsomed!)

→ Ga verder op de volgende bladzijde



Checklist

Diabetesverpleegkundige
Hybrid Closed Loop (2/2)



YpsoPump®

-
- 4 Verstrek Patiënt het volgende:
- a Een (recept voor een) 2-tal kunststof ampullen zoutoplossing 10 ml
 - b Een spuit met luerlock aansluiting met bijpassende naald
 - c Een recept Pumpcarters NovoRapid, Pumpcarters Fiasp
-
- 5 **E-learning instructie of E-learning met Begeleiding instructie:**
- “De patient heeft mij gebeld voor het plannen van de start met insuline”*
- E-learning met Ziekenhuisinstructie:**
- “De Instructeur heeft i.o.m. mij en patiënt een datum voor de start op insuline gepland”*
-
- 6 Patiënt is minimaal 1 week voor de start met insuline gestart met de sensor.
-
- 7 Patiënt heeft de certificaten van de E-learning training mylife YpsoPump en de E-learning training mylife CamAPS.
-
- 8 Tijdens de therapiestart met insuline zijn:
- de basaalstanden in de pomp ingevoerd en gecontroleerd
 - zijn de pomp en sensor gekoppeld met de app of zijn op het ‘Formulier Therapiegegevens’ de boluscalculator settings ingevuld en aan patient meegegeven.
-
- 9 De Pro-Connect code van het ziekenhuis Glooko account is aan Patiënt verstrekt.
-