



Vorbereiding op de instructie met mylife CamAPS FX voor pompgebruikers mylife™ YpsoPump®-systeem

Wat u krijgt van Ypsomed:

- ✓ mylife YpsoPump Startpakket
- ✓ mylife Orbit Inserter
- ✓ mylife 360° Rotation Clip

Wat u verder nodig heeft:

- ✓ Check afhankelijk van uw sensorkeuze of u een Android Smartphone heeft, die compatible is met [Dexcom](#) of [FSL3](#). Kijk niet alleen naar het type telefoon, maar ook naar het besturingssysteem. Let op: alleen Android smartphones zijn koppelbaar.

Wat u krijgt van uw diabetesverpleegkundige:

- ✓ Alleen als u gebruik gaat maken van Novorapid of Fiasp Pumpcart (voorgevulde ampullen met insuline) of van zoutoplossing dan dient u van uw diabetesverpleegkundige een recept te ontvangen.
- ✓ Maakt u gebruik van een ander merk insuline, dan kunt u een flesje van uw eigen merk insuline bestellen bij uw apotheek of medische groothandel. Er dient in dit geval ook een recept voor mylife YpsoPump reservoirs meegegeven te worden (artikelnummer 700001181)
- ✓ Recept voor mylife YpsoPump Orbit infuusset Soft of Micro, te bestellen bij uw medische groothandel (zie tabel voor artikelnummers).

Soft

6 mm 45 cm	6 mm 60 cm	6 mm 80 cm	9 mm 45 cm	9 mm 60 cm	9 mm 80 cm
MYOYP1861	MYOYP2461	MYOYP3161	MYOYP1891	MYOYP2491	MYOYP3191

Micro

5,5 mm 45 cm	5,5 mm 60 cm	5,5 mm 80 cm	8,5 mm 45 cm	8,5 mm 60 cm	8,5 mm 80 cm
MYOYP1851	MYOYP2451	MYOYP3151	MYOYP1881	MYOYP2481	MYOYP3181

Verder krijgt u de volgende instellingen / gegevens mee:

- ✓ Uw basaalinstellingen
- ✓ Boluscalculatorinstellingen
- ✓ Gemiddeld dagelijkse totale insulinedosis
- ✓ Pro-Connect code van het Glooko ziekenhuisaccount

Wat u verder nog doet voorafgaande aan de instructie-afspraken:**U dient een e-learning over mylife CamAPS met succes af te ronden:**

- ✓ Ga naar [CamDiab Trainingsportal](#), wijzig rechtsboven in het scherm de taal in Nederlands. Maak een nieuw account aan en kies voor “Ik ben een persoon met diabetes type 1 of familielid”.
- ✓ Volg vervolgens de training voor mylife YpsoPump gebruiker met mylife CamAPS FX. Nadat u de training succesvol heeft afgerond, ontvangt u een certificeringsnummer. Belangrijk: als u de training niet succesvol heeft afgerond, kan de instructie-afspraken niet doorgaan! U heeft het certificeringsnummer namelijk nodig om tijdens de instructie uw mylife YpsoPump te koppelen met de mylife CamAPS app.

U dient uw huidige gewicht in kilogrammen te weten:

- ✓ Voor het functioneren van het algoritme van mylife CamAPS heeft het systeem uw gewicht nodig.

Wat u voor de instructie nog dient te doen:

- ✓ Als u gebruik maakt van een Dexcom sensor, noteert u het serienummer van uw Dexcom zender. Dit nummer vindt u op het label van de doos van de zender, aan de onderzijde van de zender of in de Dexcom App.
- ✓ Verwijder zo'n 1,5 uur voor de instructie de Dexcom app van uw smartphone.
- ✓ Verwijder ook de Dexcom G6 uit de lijst met bluetooth gekoppelde apparaten op uw smartphone. Het is belangrijk dat u dit doet voordat u de mylife CamAPS app download.
- ✓ Maakt u gebruik van de Freestyle Libre 3 sensor, dan heeft u tijdens de instructie een nieuwe sensor nodig. Houd deze gereed.
- ✓ [Download](#) de mylife CamAPS app in de Google Play Store en maak een nieuw account aan.
- ✓ U ontvangt een verificatiecode per email, voer deze code in de mylife CamAPS app in.
- ✓ Houd uw mylife CamAPS certificeringsnummer en indien van toepassing, uw Dexcom G6 zender code gereed bij de instructie.
- ✓ De instructeur van Ypsomed zal de mylife CamAPS verder met u instellen.

U dient een Glooko account aan te maken voor het opslaan en delen van therapiedata:

- ✓ Maak een [Glooko account](#) aan indien u deze nog niet heeft..