



Omgang met ziekte bij mylife CamAPS FX

Opmerking: Bespreek alle aanbevelingen met uw diabetesteam.

De meeste ziektes verhogen over het algemeen de glucosespiegels:

- Overweeg om de “Boost”-modus te gebruiken als u merkt dat uw glucosespiegels hoger worden dan normaal wanneer u zich niet goed voelt.
 - Stress, emoties en pijn kunnen er ook voor zorgen dat de glucosespiegel stijgt.
 - De “Boost”-modus kan worden geprogrammeerd om tot 13 uur per keer te werken. U kunt zien of de “Boost”-modus is geprogrammeerd als u de smartphone in het PDF-rapport of in Glooko® horizontaal houdt (landscape-positie, voor het bekijken van de gedetailleerde grafiek).
 - De “Boost”-modus zorgt ervoor dat het algoritme ongeveer 35 % meer insuline toedient als de glucose hoog oploopt, maar stopt met “boosten” wanneer hij voorspelt dat de glucosespiegels uw persoonlijke doelwaarde zullen bereiken.
 - Het is aan te bevelen om de glucosespiegels nauwkeuriger te controleren als u zich niet goed voelt.
- Controleer op bloedketonen als de glucosespiegels constant hoog zijn.
 - Zelfs als de glucosespiegels niet verhoogd zijn, kan het ook de moeite waard zijn om op ketonen te controleren als u heeft overgegeven en/of diarree heeft.
- Overweeg om de infuusset en het insulinereservoir te vervangen als de glucose hoog blijft terwijl mylife CamAPS FX hard werkt om insuline toe te dienen om de glucosespiegels te corrigeren.

Omgang met ketonen:

- Als de ketonen bij u hoger liggen dan 1,5 mmol/L bij volwassenen of meer dan 0,6 mmol/L bij kinderen, overweeg dan om Auto mode stop te zetten en de regels voor de omgang met ketonen op te volgen die uw diabetesteam u heeft gegeven. Dat kan inhouden:
 - toediening van een correctie via een insulinespuit of pen
 - vervangen van de infuusset en het reservoir
 - instellen van een hogere tijdelijke basaalsnelheid op de pomp
 - drinken van veel suikervrije vloeistof en het eten van kleine hoeveelheden koolhydraten, dit kan ook helpen om de ketonen weg te werken
- Neem contact op met uw diabetesteam als u klinische ondersteuning of advies nodig heeft.
- Auto mode kan opnieuw worden gestart zodra de ketonen niet meer aanwezig zijn (minder dan 0,6 mmol/L).




Meer vrijheid. Meer vertrouwen. Met mylife.


Auto mode starten en stopzetten:

- Schuif de schakelaar in de rechter onderhoek van het startscherm van mylife CamAPS FX naar links om Auto mode te stoppen.
- Wanneer Auto mode is gestopt:
 - De voorgeprogrammeerde basaalsnelheid van de mylife YpsoPump-insulinepomp begint automatisch te lopen.
 - U kunt nog steeds de boluscalculator van mylife CamAPS FX gebruiken om insulinebolussen toe te dienen voor maaltijden en snacks.
 - Handmatige correcties kunnen ook worden toegediend via de mylife CamAPS FX-boluscalculator.
- Om Auto mode opnieuw te starten, schuift u de schakelaar onderaan het startscherm naar rechts om mylife CamAPS FX weer in te schakelen.

Opmerking: Bespreek alle aanbevelingen met uw diabetesteam.

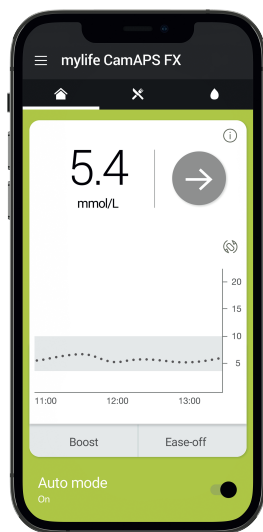

Auto mode geactiveerd

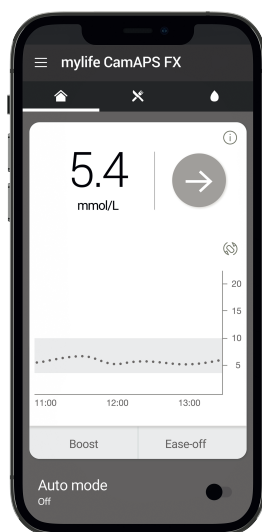

Auto mode gedeactiveerd

Vrijwaringsclausule:

De afbeeldingen van de producten dienen alleen ter illustratie. // mylife en YpsoPump zijn geregistreerde handelsmerken van Ypsomed AG. // CamAPS is een geregistreerd handelsmerk van CamDiab Ltd. // Het woordmerk Bluetooth® en bijbehorende logo's zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc., voor gebruik hiervan door Ypsomed is een licentie verleend. // Andere productnamen en handelsmerken zijn eigendom van de respectievelijke eigenaars.

Voor het veilig gebruiken van genoemde producten verwijzen wij u naar de gebruiksaanwijzing of mylife-diabetescare.nl/veiligheid