



## Checklist

Diabetesverpleegkundige  
Hybrid Closed Loop (1/2)



YpsoPump®

Ter info: uw patiënt heeft ook een Checklijst ontvangen met door hem/haar uit te voeren acties.

### Voorwaarden voor gebruik van het systeem:

- 1 Het type smartphone én het besturingssysteem zijn compatible met de CGM sensor.  
Check via [mylife-diabetes.info](http://mylife-diabetes.info) of via de QR-code

Patiënt heeft  
een Dexcom  
G6 sensor



Patiënt heeft  
een Freestyle  
Libre 3 sensor



- 2 Patiënt gaat gebruik maken van kant en klare Pumpcarters NovoRapid of Pumpcarters Fiasp

### Vorbereidingen voor de instructie:

- 3 In het Aanvraagportaal van de Medische Specialzaak:
  - a Bestel de mylife YpsoPump
  - b Bestel de Dexcom G6 of FSL3 sensoren (indien nodig)
  - c Bestel de mylife Orbit Micro (staal) of YpsoPump Inset (soft) infussets
  - d Selecteer dat het systeem als Hybrid Closed Loop gebruikt wordt
  - e Selecteer soort instructie 
    - o Online (E-learning)
    - o Thuis (E-learning met begeleiding)
    - o Polikliniek (E-learning met ziekenhuisinstructie)
  - f Vraag aan en motiveer indien Patiënt een 3 maanden ervaringsperiode nodig heeft 
    - I.g.v. Bosman in hun aanvraagportaal door deze optie te selecteren
    - I.g.v. Mediq via [www.mylife-diabetes.info](http://www.mylife-diabetes.info), (wachtwoord Ypsomed!)

→ Ga verder op de volgende bladzijde



## Checklist

Diabetesverpleegkundige  
Hybrid Closed Loop (2/2)



YpsoPump®

4 Verstrek Patiënt het volgende:

- a Een (recept voor een) 2-tal kunststof ampullen zoutoplossing 10 ml
- b Een spuit met luerlock aansluiting met bijpassende naald
- c Een recept Pumpcarters NovoRapid, Pumpcarters Fiasp

5 **E-learning instructie of E-learning met Begeleiding instructie:**

*“De patient heeft mij gebeld voor het plannen van de start met insuline”*

**E-learning met Ziekenhuisinstructie:**

*“De Instructeur heeft i.o.m. mij en patiënt een datum voor de start op insuline gepland”*

6 Patiënt is minimaal 1 week voor de start met insuline gestart met de sensor.

7 Patiënt heeft de certificaten van de E-learning training mylife YpsoPump en de E-learning training mylife CamAPS.

8 Tijdens de therapiestart met insuline zijn:

- de basaalstanden in de pomp ingevoerd en gecontroleerd
- zijn de pomp en sensor gekoppeld met de app of zijn op het ‘Formulier Therapiegegevens’ de boluscalculator settings ingevuld en aan patient meegegeven.

9 De Pro-Connect code van het ziekenhuis Glooko account is aan Patiënt verstrekt.

← Einde