



## Checklist



Ypsopump®

1



Ik heb een Android telefoon die werkt met mijn Dexcom G6 of Freestyle Libre 3 sensor

2



Ik ben gebeld door de Ypsomed instructeur en heb twee instructie afspraken gemaakt



**LET OP!** Als de Ypsomed instructeur bij u thuis komt voor instructie moet u bekend zijn met het gebruik van de CGM sensor en reeds een sensor dragen.

3



Ik heb een afspraak gemaakt met mijn diabetesverpleegkundige voor de start op insuline

Deze afspraak valt tussen de twee afspraken in die ik met de Ypsomed instructeur gemaakt heb

4



Ik heb infuussets voor de mylife Ypsopump in huis

5



Ik heb een 10 ml flacon zoutoplossing met bijpassende spuit en naald in huis of ik heb via mijn behandelaar een reservoir zoutoplossing 1.6 ml ontvangen

6



Ik heb een recept voor voorgevulde ampullen NovoRapid of Fiasp 1.6 ml insuline

7



Ik heb de mylife Ypsopump E-learning training voor de pomp succesvol afgerond voordat de Ypsomed instructeur bij mij thuis komt

8



Ik heb de mylife CamAPS E-learning training succesvol afgerond voordat de start met insuline bij de diabetesverpleegkundige plaatsvindt

9



Ik heb de mylife CamAPS app gedownload en een account aangemaakt



Ga verder op de volgende bladzijde



## Checklist



YpsoPump®

10



Ik heb in de mylife CamAPS app een virtuele pomp en virtuele sensor gekoppeld



**LET OP!** Koppel niet uw mylife YpsoPump. Voor een correcte start van het algoritme dient dit plaats te vinden na de start op insuline.

11



Ik heb de Glooko app gedownload en een Glooko account (aangemaakt)

12

Ik neem naar mijn bezoek aan de diabetesverpleegkundige voor de start op insuline mee:



• De mylife YpsoPump



• Het certificaat van de mylife YpsoPump E-learning training



• Een paar infuussets



• De inserter voor het inbrengen van de mylife Orbit Micro infuusset (voor de YpsoPump Inset infuusset is dit niet nodig)



• De voorgevulde ampullen NovoRapid of Fiasp 1.6 ml insuline



• Mijn smartphone met daarop de mylife CamAPS app



• Het 'Formulier Therapiegegevens'



Ga verder op de volgende bladzijde



## Checklist



YpsoPump®

13



Ik heb tijdens mijn bezoek aan de diabetesverpleegkundige voor de start op insuline:

- a Het 'Formulier Therapiegegevens' ontvangen waarop in ieder geval de settings voor de boluscalculator zijn ingevuld
- b De Pro-Connect code voor Glooko ontvangen

14

Ik heb voor de tweede afspraak met de Ypsomed instructeur over mylife CamAPS de volgende zaken bij de hand:



- Het ingevulde 'Formulier Therapiegegevens'



- Het serienummer van mijn huidige Dexcom sensor of een nieuwe Freestyle Libre 3 sensor



- Het unieke mylife CamAPS certificeringsnummer dat u ontving na succesvolle afronding van de mylife CamAPS E-learning



- De inloggegevens (gebruikersnaam en wachtwoord) van het mylife CamAPS account



- De inloggegevens (gebruikersnaam en wachtwoord) van het Glooko account



- De Pro-Connect code voor Glooko