



YpsoPump®



mylife CamAPS FX-app – kiezen uit twee systemen voor continue glucosemeting (CGM)

Met de mylife CamAPS FX-app kunt u kiezen uit twee CGM-systemen; de Dexcom G6 of de FreeStyle Libre 3. Geniet van keuzevrijheid!

Vergelijking van Dexcom G6 en FreeStyle Libre 3

Functie	Dexcom G6	FreeStyle Libre 3
CGM-categorie	Realtime-CGM	Realtime-CGM
Formaat	46×30×15 mm	D 21×2,9 mm
Onderdelen	Zender en sensor	Alles-in-één-sensor
Plaats van aanbrengen op het lichaam	Arm, buik (voor kinderen/jongeren van 2 tot 17 jaar ook het bovengedeelte van de billen)	Achterkant van de bovenarm
Gebruik toegestaan	Vanaf een leeftijd van 2 jaar	Vanaf een leeftijd van 4 jaar
Indicaties	Medisch hulpmiddel voor realtime continue glucosemeting, geïndiceerd voor diabetesmanagement en bedoeld ter vervanging van vingerpriktests op bloedglucose ten behoeve van therapiebeslissingen op het gebied van diabetes, waaronder insulinedosering, zwangerschap (raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de Dexcom G6)	Medisch hulpmiddel voor realtime continue glucosemeting (CGM) met alarmfunctie, geïndiceerd voor diabetesmanagement. Is bedoeld ter vervanging van vingerpriktests op bloedglucose bij therapiebeslissingen ten behoeve van diabetes, tenzij anders geïndiceerd. (raadpleeg de gebruikershandleiding van FreeStyle Libre 3)
Draagduur sensor	10 dagen	14 dagen
Bewaartijd sensorgegevens:	24 uur	14 dagen
Opwarmtijd sensor	2 uur	1 uur
Meetfrequentie	Om de 5 minuten	Iedere minuut
Kalibreren	In de fabriek gekalibreerd, geen vingerpriktest op bloedglucose nodig. Handmatig kalibreren is mogelijk als de sensor onnauwkeurig is (raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de Dexcom G6)	In de fabriek gekalibreerd, geen vingerpriktest op bloedglucose nodig. Geen handmatig kalibreren nodig (raadpleeg de gebruikershandleiding van FreeStyle Libre 3)
Tijdsvertraging	3,5 minuten (volwassenen)	2,4 minuten (volwassenen) 2,1 minuten (kinderen)
Bluetooth low energy-gebied	6 meter	10 meter (in combinatie met de mylife CamAPS FX-app 6 meter)
Gemiddeld absoluut relatief verschil (Mean Absolute Relative Difference, MARD)	Totale MARD: 9,0 % Kinderen: 7,7 % Volwassenen: 9,8 % (raadpleeg de gebruiksaanwijzing van Dexcom G6)	Algehele MARD: 7,8 % (raadpleeg de gebruikershandleiding van FreeStyle Libre 3)



Meer vrijheid. Meer vertrouwen. Met mylife.

YPSOMED
SELFCARE SOLUTIONS



Vergelijking van Dexcom G6 en FreeStyle Libre 3

Functie	Dexcom G6	FreeStyle Libre 3
Smartphonecompatibiliteit	Compatibel met smartphones en versies van besturingssystemen die compatibel zijn met de Dexcom G6-app. Check hier: www.dexcom.com/compatibility	Een lijst van smartphones die compatibel zijn met de Freestyle Libre 3-sensor en de FreeStyle Libre 3-app is te vinden op www.diabetescare.abbott/support/manuals.html (zie document "Mobile Device & OS Compatibility").
Meldingen en waarschuwingen in de mylife CamAPS FX-app	Urgent laag (kan niet worden uitgeschakeld), naderend urgent laag, laag, hoog, stijgsnelheid, daalsnelheid, sensorsignaalverlies, hervullen pomp (aanpasbare drempelwaarden en bereik van de geluidssignalen of trillen voor meldingen en opties voor herhalen van meldingen beschikbaar)	Urgent laag (kan niet worden uitgeschakeld), naderend urgent laag, laag, hoog, stijgsnelheid, daalsnelheid, sensorsignaalverlies, hervullen pomp (aanpasbare drempelwaarden en bereik van de geluidssignalen of trillen voor meldingen en opties voor herhalen van meldingen beschikbaar)
Communicatie met de mylife CamAPS FX-app	Bij het opstarten van de sensor en voor de verbinding tijdens het gebruik: Bluetooth®	Bij het opstarten van de sensor: contactloze communicatie (near field communication, NFC) Verbinding tijdens gebruik: Bluetooth®
Simultaan te gebruiken op meerdere apps	Nee	Nee

Tabel 1: Vergelijking van FreeStyle Libre 3 en Dexcom G6

Overschakelen van de ene sensor naar de andere

Voor het overstappen van het ene CGM-systeem naar het andere, is de belangrijkste informatie hier vermeld achter de opsommingstekens:

- mylife CamAPS FX kan voor beide CGM-systemen worden gebruikt. U hoeft geen andere app te downloaden als u besluit om naar een ander CGM-systeem over te stappen.
- Als u voor het eerst begint met de mylife CamAPS FX-app kunt u kiezen tussen het gebruiken van een Dexcom G6-sensor of een FreeStyle Libre 3-sensor.
- Als u al gebruik maakt van de mylife CamAPS FX-app, open dan het hoofdmenu van de app, ga naar het gedeelte over de CGM en tik op het blauwe serienummer van de sensor om het koppelingsproces van de CGM op te starten. Selecteer de sensor die u wilt koppelen en volg de instructies op die worden gegeven. Koppelen met een nieuw CGM-systeem moet idealiter worden gedaan als uw huidige sensor vervalst, om verspilling van een sensor te vermijden.

Draait op Android-telefoons.
iOS volgt.



Uw plaatselijke contacten

Abbott Diabetescare
Telefoonnr.: 0800 022 88 28
E-mail: info@myfreestyle.nl

Dexcom
Telefoonnr.: 08000 201 985
E-mail: nl.sales@dexcom.com

mylife Diabetescare
Telefoonnummer: 0800 9 77 66 33
E-mail: info@ypsomed.nl

Vrijwaringsclausule: De afbeeldingen van de producten dienen alleen ter illustratie. // mylife en YpsoPump zijn geregistreerde handelsmerken van Ypsomed AG. // CamAPS is een geregistreerd handelsmerk van CamDiab Ltd. // Dexcom en Dexcom G6 zijn geregistreerde handelsmerken van Dexcom, Inc. in de Verenigde Staten en/of andere landen. // De sensorbehuizing, FreeStyle, Libre en daaraan gerelateerde merken zijn handelsmerken van Abbott. // Het woordmerk Bluetooth® en bijbehorende logo's zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc., voor gebruik hiervan door Ypsomed is een licentie verleend. // Andere productnamen en handelsmerken zijn eigendom van de respectievelijke eigenaars.

📄 Voor het veilig gebruiken van genoemde producten verwijzen wij u naar de gebruiksaanwijzing of www.mylife-diabetescare.nl/veiligheid